

ウイルスなどによる

# 嘔吐物 処理キット

使い捨て



嘔吐物の飛沫から身を守るためのグッズがひとつに!

## 正しい処理で二次感染をしっかりと予防

使い回しはダメ! 必ずご使用後は正しい方法で廃棄してください。

### セット内容

マスク(不織布)

帽子(不織布)

●頭髪への付着を防ぎます。

エプロン(ビニール製)

●作業中に衣服への付着を避けます。

リバース<sup>消臭</sup>クリーン

●このセットの要です。  
嘔吐物を速やかに固め異臭も瞬時に閉じ込めます。

処理用ビニール袋  
黒(中)/白(大)

チリトリ×2枚(紙)

●紙製のオリジナルチリトリです。  
組立てが簡単で使い捨てに最適。

シューズカバー(ポリエチレン)

●靴に着くことを避けます。

手袋(ニトリル)

●作業中に外れる事のないニトリル製で  
ご用意しました。

ペーパータオル  
輪ゴム×2本



※セット内容の仕様については告知なく変更する場合がございます。

アイトン株式会社

# 嘔吐物 処理キット を使った

使い捨て



二次感染予防のための

# 嘔吐物処理マニュアル

※高価なじゅうたん等に使用する場合、色落ちが起こるケースもありますのでご注意ください。

**まず最初に** セットされている帽子、マスク、エプロン、手袋、シューズカバーを装着し、紙製のチトリを組み立てます。

帽子  
マスク  
エプロン  
ニトリル手袋  
紙製チトリ × 2個  
シューズカバー

**紙製チトリ組み立て方**

**3** 組み立てた紙製チトリで集めます

**4** チトリごと濡いビニール袋に入れます

**1** 装着完了後、リバーズ消臭クリーンをあけます

**2** 嘔吐物にまんべんなくふりかけます

**7** 袋の口をよく締めて廃棄

**8** 処理後の床はアルタンノロエースまたは次亜塩素酸ナトリウムで消毒します

**5** 輪ゴムでくちを閉じます

**6** 使用したものをすべてをビニール袋にいけます (汚れていないように見えても必ず廃棄！)

ビニール袋

**9** アルタンNAハンドソープでしっかり手洗い

エタノール製剤・食品添加物 **アルタンノロエース** **ウイルスによる食中毒対策に！** 手洗いせっけん **NAハンドソープ** 泡タイプ

広島大学との共同研究から開発されたウイルスによる食中毒対策に有効なエタノール製剤(アルタンノロエース)と手洗いせっけん(アルタンNAハンドソープ)です。

**対策セットとして一緒にお使いください。**

現場の声をカタチに...いつもアルタンから。



**アルタン株式会社**

東京都大田区東糎谷 3-11-10

ホームページ <http://www.altan.co.jp>